

Petratec-Praxiswagen



Nummer: _____

Oktober 2014

Petratschek GmbH
In der Schmalau 4
90427 Nürnberg

T +49. (0)911. 300 68 61
F +49. (0)911. 300 68 63
E-Mail: info@Petratec.de
Homepage: www.Petratec.de

Aufbau- und Pflegeanleitung

Inhalt

Aufbauanleitung.....	Seite 2
Pflegeanleitung.....	Seite 5
Feinsicherung in der Steckdosenleiste.....	Seite 6
Passende Schlauchsysteme.....	Seite 7

Bitte lesen Sie diese Aufbau- und Pflegeanleitung sorgfältig durch!

AUFBAUANLEITUNG

Zur Inbetriebnahme und Bestückung des Praxiswagens mit Ihren Geräten, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Glastür um 270 Grad, so dass diese an der Seitenwand anliegt. Dort wird die Glastür von einem Magneten gehalten.
2. Ziehen Sie die Vollauszug-Fachböden nach vorne aus dem Wagen und stellen Sie Ihre Geräte, ohne Kabel, auf die Fachböden.



3. Öffnen Sie die Türe an der Wagenrückseite und schließen Sie die Elektrokabel der Geräte an der Steckdosenleiste an. Die Steckdosenleiste hat einen Anschlusswert von max. 230 Watt.



Um Ordnung zu schaffen, können Sie zu lange Kabel in den Kabelbündelhaltern auf der Rückseite der Fachböden verstauen.

4. Schließen Sie nun die Fußanlasser an den Geräten an und legen Sie die Fußanlasser in den untersten Fachboden.

5. OPTIONAL - falls Sie Adapter für Fußanlasser bestellt haben: Reinigen Sie die Unterseite der Fußanlasser – diese müssen dort absolut schmutz- und fettfrei sein! Kleben Sie dann die mitgelieferten Pads auf die Unterseite der Fußanlasser und diese anschließend auf den Adapter.
Vorhandene GummifüÙe auf der Unterseite der Fußanlasser müssen eventuell entfernt werden.



6. Öffnen Sie nun alle Kabeldurchführungen. Hierfür drehen Sie den Deckel bitte entgegen dem Uhrzeigersinn von 6 Uhr-Stellung auf 4 Uhr-Stellung.
Bei Praxiswagen mit POM-Seitenwanddurchführungen entfällt dieser Schritt!



7. Führen Sie nun die Handstückkabel durch die geöffneten Edelstahldurchführungen und schließen Sie die Handstückkabel an den Geräten an. Die Handstücke legen Sie in den silberfarbenen Handstückhaltern ab.
8. Die silberfarbenen Handstückhalter lassen sich durch Ziehen und leichte links-rechts Bewegungen aus dem POM-Halter lösen und

können autoklaviert werden. (Bitte autoklavieren Sie die Handstückhalter vor dem ersten Einsatz)

9. OPTIONAL: Das mitgelieferte OP-Tuch (bitte vor dem ersten Einsatz waschen und autoklavieren) schieben sie mit der eingenähten Rundschnur seitlich in die Alu Leiste ein.
10. Die Flaschen für die Kühlmittel hängen Sie bitte an den Edelstahlflaschenhalter. Die Kühlmittelschläuche von der Flasche zum Gerät werden durch die seitlichen Edelstahldurchführungen verlegt.
11. Öffnen nun Sie die hintere Türe einen Spalt und ziehen Sie ca. 40 cm des Elektrokabels heraus. Anschließend führen Sie den Stecker durch die geöffnete Edelstahldurchführung:



Bitte achten Sie beim Schließen der Türe darauf, dass im Bereich der Abdeckung des Kabelaufrollers kein Kabel im Wege ist, damit sich die Türe schließen lässt.

12. Zuletzt schließen Sie alle Kabeldurchführungen wieder. Hierfür setzen Sie die Deckel auf 4 Uhr-Stellung ein und drehen Sie im Uhrzeigersinn auf 6 Uhr- die Abdeckung ist verriegelt.

**Bei Fragen oder Problemen erreichen Sie uns unter:
0911 / 3006861 oder 0172 / 9192018**

PFLEGEANLEITUNG

Der Praxiswagen wird von uns vor dem Versand sorgfältig endgereinigt. Dennoch sollten Sie den Wagen vor dem ersten Einsatz selbst nochmals reinigen.

Regelmäßige Reinigung:

Zur regelmäßigen Reinigung des Praxiswagens empfehlen wir ausschließlich die Verwendung gebrauchsfertig getränkter Tücher für den medizinischen Bereich.

Bei der Reinigung mit konzentrierten Desinfektionsmitteln, sauren Chemikalien oder stark oxidierenden Substanzen besteht die Gefahr, dass die Metalloberflächen des Wagens dunkel anlaufen. Diese Gefahr ist besonders hoch, wenn die von den Herstellern vorgegebenen Mischungsverhältnisse nicht beachtet werden oder die Mittel mit einem Schaumprühkopf aufgetragen und nicht gleich abgewischt werden.

Vermeiden Sie unbedingt, dass Wasser, Reiniger oder die als Kühlmittel verwendete Kochsalzlösung in die Auszugsschienen der Fachböden läuft. Auf lange Sicht wirkt sich dies negativ auf die Leichtläufigkeit der Auszüge aus. Sollte doch einmal etwas im Wagen auslaufen, so nehmen Sie diese Flüssigkeiten bitte umgehend auf!

FEINSICHERUNG IN DER STECKDOSENLEISTE

Alle Petratec-Praxiswagen genügen höchsten Sicherheitsansprüchen. Daher ist die 4-fach Steckdosenleiste mit einer Feinsicherung versehen. Im Falle einer Überspannung sind Sie, Ihre Patienten und alle Geräte im Wagen optimal geschützt. Eine Ersatz-Feinsicherung befindet sich im Deckel der Verteilerdose auf der Innenseite der hinteren Türe!



PASSENDE SCHLAUCHSYSTEME

Astra Tech / W&H 923 SI

um die Versorgung der Geräte mit Kühlmittelflüssigkeit sicherzustellen, können Sie folgende Original Schlauchsysteme bei uns bestellen, wir haben in der Anlage ein entsprechendes Bestellformular beigelegt.

Mectron Piezosurgery

um die Versorgung der Geräte mit Kühlmittelflüssigkeit sicherzustellen, können Sie folgende original Schlauchsysteme der Firma Mectron verwenden:

Infusionsbesteck
Art. Nr. 3230006
Länge: 32 cm

Pumpenschlauch „lang“
Art. Nr. 2900076
Länge: 80 cm

Verbindung „Schlauch/Schlauch“
Art. Nr. 00680014
Verbindungselement zum Handstückschlauch

Für weitere Fragen zum Mectron Gerät wenden Sie sich bitte an Herrn Dressler: Tel. Nr. 0221 – 4920150.